

Спрей назальний з води морської стерильної Атомер

Спрей назальний з води морської стерильної Атомер призначений для очищення, зволоження та зменшення набряку носових порожнин. Усуває накопичений слиз, зволожує слизову оболонку носу та робить дихання вільним.

**Атомер спреј 150 мл,
Атомер бебі спреј 100 мл,
Атомер міні спреј 35 мл**

Склад. Стерильний ізотонічний розчин морської води.

Містить натуральні морські мінерали та мікроелементи, такі як кальцій, калій, магній, натрій, тощо.

Атомер рекомендований:

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, додаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, атрофічних, гіпертрофічних ринітах;
- при хронічних аденоїдитах;
- для профілактики інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для проведення гігієни носової порожнини;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціонування повітря.

Інструкція по застосуванню. Розмістити назальний розпилювач на верхівку флакону та обережно натиснути для закріплення. Рекомендовано робити мінімум 4 впорскування в кожен ніздрю до 4 разів на день, з метою профілактики – 1-2 впорскування на день.

Розпилювач Атомер бебі спреј спеціально розроблений для дітей. Маленький наконечник, що обертається, дозволяє використовувати засіб в будь-якому положенні дитини, що усуває ризик пошкодження слизової оболонки носа.

Застереження. Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. Промити розпилювач після кожного використання. Перед використанням під час вагітності або годування груддю проконсультуватися з лікарем.

Переваги Атомер:

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

**Атомер прополіс спреј 150 мл,
Атомер прополіс бебі спреј 100 мл,
Атомер міні прополіс спреј 35 мл**

Склад. Стерильний ізотонічний розчин морської води з екстрактом прополісу.

Містить натуральні морські мінерали та мікроелементи, такі як кальцій, калій, магній, натрій, тощо. Прополіс має бактерицидну, противірусну, протизапальну та імуностимулюючу дію, володіє заспокійливими та пом'якшувальними властивостями.

Атомер прополіс рекомендований:

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, додаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, атрофічних, гіпертрофічних ринітах;
- при хронічних аденоїдитах;
- для профілактики інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для проведення гігієни носової порожнини;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціонування повітря.

Інструкція по застосуванню. Розмістити назальний розпилювач на верхівку флакону та обережно натиснути для закріплення. Рекомендовано робити мінімум 4 впорскування в кожен ніздрю до 4 разів на день, з метою профілактики – 1-2 впорскування на день. Придатний для дорослих та дітей старше 12 місяців.

Розпилювач Атомер бебі спреј спеціально розроблений для дітей. Маленький наконечник, що обертається, дозволяє використовувати засіб в будь-якому положенні дитини, що усуває ризик пошкодження слизової оболонки носа.

Застереження. Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. Промити розпилювач після кожного використання. Не використовувати при наявності алергії до будь-якого компоненту. Перед використанням під час вагітності або годування груддю проконсультуватися з лікарем.

Переваги Атомер прополіс:

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- містить прополіс;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

Атомер гіпертонічний спреј 100 мл

Склад. Стерильний гіпертонічний розчин морської води, що містить 2,5 % натрію хлориду. Містить натуральні морські мінерали та мікроелементи, такі як кальцій, калій, магній, натрій, тощо.

Атомер гіпертонічний рекомендований:

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, додаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, гіпертрофічних ринітах;
- при гайморитах, фронтитах, ейтмоїдитах;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціонування повітря.

Інструкція по застосуванню. Розмістити назальний розпилювач на верхівку флакону та обережно натиснути для закріплення. Рекомендовано робити 1-3 впорскування в кожен ніздрю до 3 разів на день. Придатний для дорослих та дітей старше 3 років.

Застереження. Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. Промити розпилювач після кожного використання. Перед використанням під час вагітності або годування груддю проконсультуватися з лікарем.

Переваги Атомер гіпертонічний:

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- гіпертонічний розчин забезпечує зменшення набряку слизової оболонки носової порожнини та видаленню надлишкової рідини завдяки різниці осмотичного тиску;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

**Атомер м'ята та евкаліпт спреј 150 мл,
Атомер міні м'ята та евкаліпт спреј 35 мл**

Склад. Стерильний ізотонічний розчин морської води з ефірними оліями евкаліпту та натуральним екстрактом м'яти. Містить натуральні морські мінерали та мікроелементи, такі як кальцій, калій, магній, натрій, тощо.

М'ята та евкаліпт мають бактерицидну, противірусну та протизапальну дію.

Атомер м'ята та евкаліпт рекомендований:

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, додаткових пазух і носоглотки;
- при вазомоторних, гіпертрофічних ринітах;
- при гайморитах, фронтитах, ейтмоїдитах;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, системи нагрівання та кондиціонування повітря.

Інструкція по застосуванню. Розмістити назальний розпилювач на верхівку флакону та обережно натиснути для закріплення. Рекомендовано робити 1-3 впорскування в кожен ніздрю до 3 разів на день. Придатний для дорослих та дітей старше 6 років.

Застереження. Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. Промити розпилювач після кожного використання. Не використовувати під час вагітності, годування груддю або при наявності алергії до будь-якого компоненту.

Переваги Атомер м'ята та евкаліпт:

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- містить ефірні олії евкаліпту та екстракт м'яти;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

Виробник:

PHARMACOSMETIC-DIAFARM G.SOULTOGIANNIS & Co E.E.

14th km Thessaloniki-Poligiros N.R., Thermi, Thessaloniki, Greece, P.C.57001 P.O. BOX 60294

Tel: +30 2310 486 320, bioplant@otenet.gr

www.athomer.com

ФАРМАКОСМЕТИК-ДІАФАРМ Г.СОУЛТОДЖІАННІС ЕНД Ко Е.Е.

14л км Тессалонікі-Полігірос Н.Р., Термі, Тессалонікі, Греція, індекс 57001, п/с 60294

Тел.: +30 2310 486 320, bioplant@otenet.gr

www.athomer.com

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "МІТЕК"

03057, м. Київ, вул. Металістів, 16

Тел.: 044 495 29 29, mitek@mitek.kiev.ua

www.mitek.kiev.ua

Дата останнього перегляду. 14.09.2017 р.

