

## Спрей назальний з води морської стерильної Атомер

Спрей назальний з води морської стерильної Атомер призначений для очищення, зволоження та зменшення набряку носових порожнин. Усуває накопичений слиз, зволожує слизові оболонки носу та робить дихання вільним.

### Атомер гіпертонічний спрей 100 мл

**Склад.** Стерильний гіпертонічний розчин морської води, що містить 2,5 % натрію хлориду. Містить натуральні морські мінерали та мікроелементи, такі як кальцій, калій, магній, натрій, тощо.

#### Атомер гіпертонічний рекомендований:

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, придаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, гіпертрофічних ринітах;
- при гайморитах, фронтитах, ейтмоїдитах;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціонування повітря.

**Інструкція по застосуванню.** Розмістити назальний розпилювач на верхівку флакону та обережно натиснути для закріплення. Рекомендовано робити 1-3 вприскування в кожную ніздрю до 3 разів на день. Придатний для дорослих та дітей старше 3 років.

**Застереження.** Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. Промити розпилювач після кожного використання. Перед використанням під час вагітності або годування груддю проконсультуватися з лікарем.

#### Переваги Атомер гіпертонічний:

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- гіпертонічний розчин забезпечує зменшення набряку слизової оболонки носової порожнини та видаленню надлишкової рідини завдяки різниці осмотичного тиску;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва

#### ВИРОБНИК:

PHARMACOSMETIC-DIAFARM STERGIOULAS STYLIANOS & Co L.P. 14th km Thessaloniki-Poligiros N.R., Thermi, Thessaloniki, Greece, P.C.57001 P.O. BOX 60294 / Tel: +30 2310 486 320, bioplant@otenet.gr / www.athomer.com  
ФАРМАКОСМЕТИК-ДІАФАРМ СТЕРЖІОУЛАС СТИЛІАНОС & Ко Л.П. 14-й км Тессалонікі-Полігірос Н.Р., Термі, Тессалонікі, Греція, індекс 57001, п/с 60294 / Тел.: +30 2310 486 320, bioplant@otenet.gr / www.athomer.com

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ: ТОВ «МІТЕК, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 16. Тел.:  
044 495 29 29, mitek@mitek.kiev.ua / www.mitek.kiev.ua

Дата останнього перегляду 10.02.2020