

Спрей назальний з води морської стерильної Атомер

Спрей назальний з води морської стерильної Атомер призначений для очищення, зволоження та зменшення набряку носових порожнин. Усуває накопичений слиз, зволожує слизові оболонки носу та робить дихання вільним.

**Атомер прополіс спрей 150 мл,
Атомер прополіс бебі спрей 100 мл,
Атомер міні прополіс спрей 35 мл**

Склад. Стерильний ізотонічний розчин морської води з екстрактом прополісу. Містить натуральні морські мінерали та мікроелементи, такі як кальцій, калій, магній, натрій, тощо. Прополіс має бактерицидну, протівірусну, протизапальну та імуностимулюючу дію, володіє заспокійливими та пом'якшувальними властивостями.

Атомер прополіс рекомендований:

- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, придаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, атрофічних, гіпертрофічних ринітах;
- при хронічних аденоїдитах;
- для профілактики інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для проведення гігієни носової порожнини;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціонування повітря.

Інструкція по застосуванню. Розмістити назальний розпилювач на верхівку флакону та обережно натиснути для закріплення. Рекомендовано робити мінімум 4 вприскування в кожную ніздрю до 4 разів на день, з метою профілактики – 1-2 вприскування на день. Придатний для дорослих та дітей старше 12 місяців.

Розпилювач Атомер бебі спрей спеціально розроблений для дітей. Маленький наконечник, що обертається, дозволяє використовувати засіб в будь-якому положенні дитини, що усуває ризик пошкодження слизової оболонки носа.

Застереження. Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від дітей місці. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці. Промити розпилювач після кожного використання. Не використовувати при наявності алергії до будь-якого компоненту. Перед використанням під час вагітності або годування груддю проконсультуватися з лікарем.

Переваги Атомер прополіс:

- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- містить прополіс;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов'язковому контролю якості протягом виробництва.

ВИРОБНИК:

PHARMACOSMETIC-DIAFARM STERGIOULAS STYLIANOS & Co L.P. 14th km Thessaloniki-Poligiros N.R.,
Thermi, Thessaloniki, Greece, P.C.57001 P.O. BOX 60294 / Tel: +30 2310 486 320, bioplant@otenet.gr /
www.athomer.com
ФАРМАКОСМЕТИК-ДІАФАРМ СТЕРЖДІОУЛАС СТИЛІАНОС & Ко Л.П. 14-й км
Тессалонікі-Полігірос Н.Р., Термі, Тессалоніки, Греція, індекс 57001, п/с 60294 / Тел.: +30 2310 486
320, bioplant@otenet.gr / www.athomer.com

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ: ТОВ «МІТЕК, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 16. Тел.:
044 495 29 29, mitek@mittek.kiev.ua / www.mitek.kiev.ua

Дата останнього перегляду 10.02.2020